



راهنما کاربری نرم افزار تحت وب Digipatho :

<https://Digipatho.imatt.group>


آدرس قابل دسترس نرم افزار به شرح مقابل می باشد:

ابتدا در صفحه لاگین کاربر میتواند با شناسه کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شود. (به عنوان مثال کاربری با مشخصات admin و رمز عبور cancer1401 برای تست سامانه ایجاد شده است).

در اولین صفحه بعد ورود به حساب کاربری، وارد محیط workspace خواهید شد. که در سمت راست صفحه میتوانید با گزینه Add image تصاویر اسکن شده لام را در سامانه بارگذاری نمایید.




با استفاده از گزینه Upload New image میتوان تصویر مورد نظر را انتخاب کرده و در سامانه بارگذاری نمود.

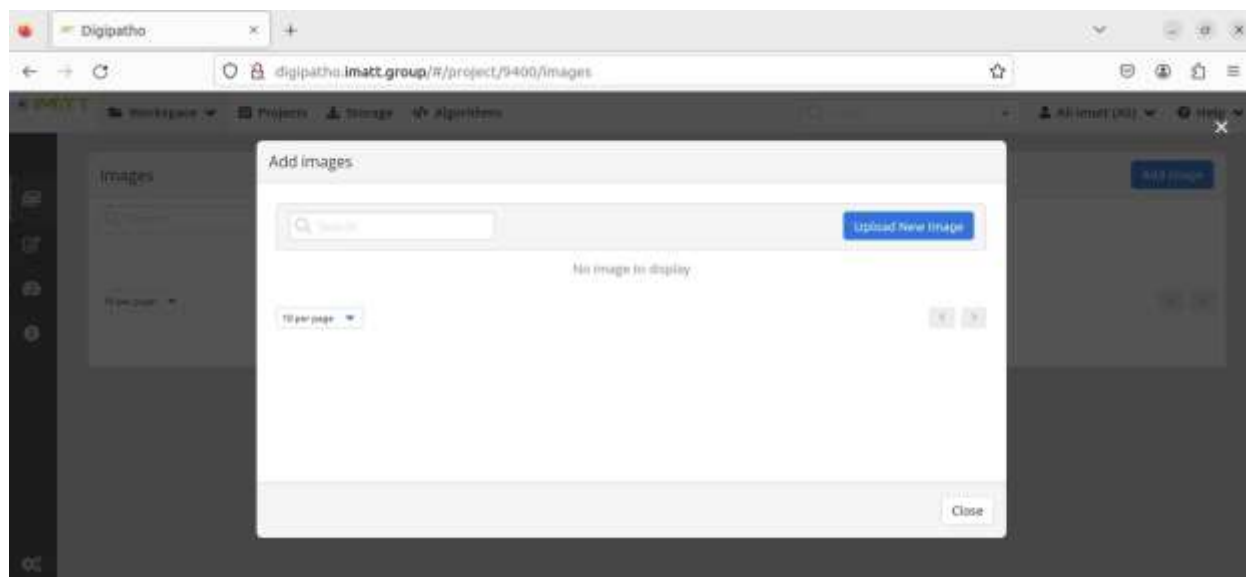




در این سامانه امکان بارگزاری انواع فرمت های مرسوم تصاویر لام وجود دارد. از جمله TIFF و Dicom امکان پذیر می باشد.

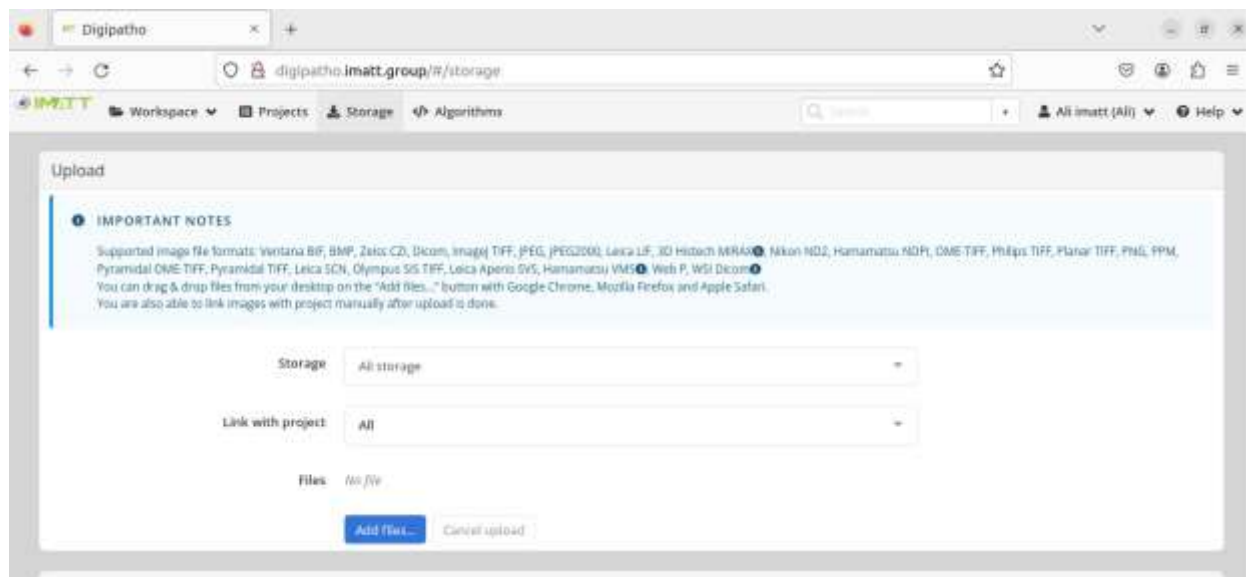


پس از بارگذاری تصاویر در سامانه میتوان هر کدام را در یک پروژه دسته بندی کرد یا با کلیک بر روی هر تصویر وارد فضای علامت گذاری و تشخیصی شد.

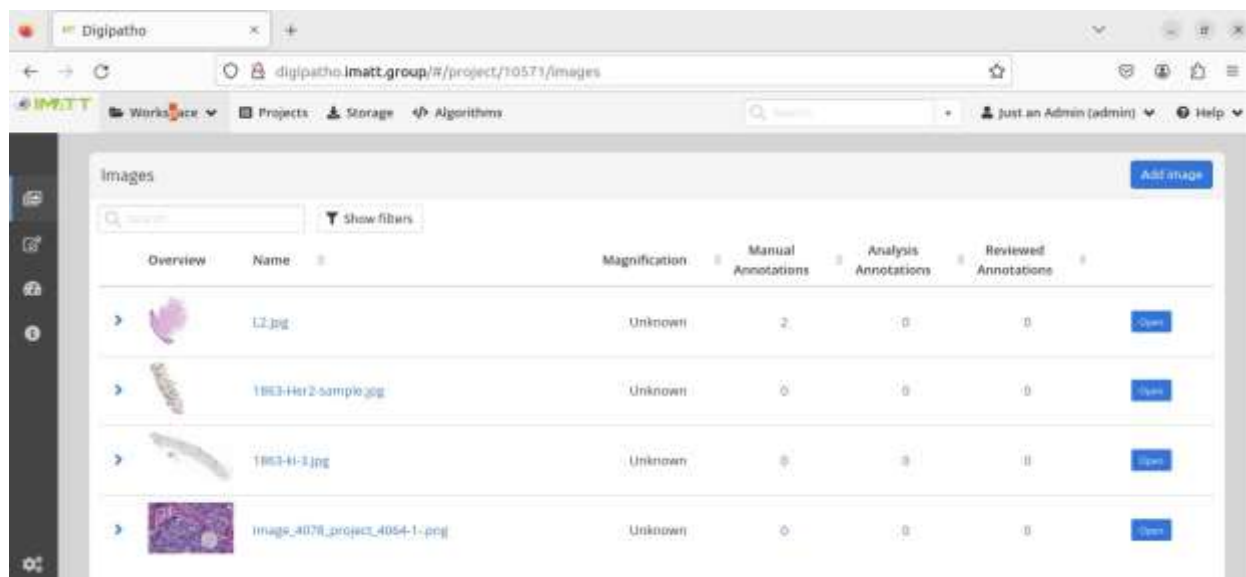


در محیط علامت گذاری امکان دیدن تصویر در بزرگنمایی مختلف حتی بزرگنمایی دیجیتال تصویر را مشاهده کرد.


در قسمت بالا ابزار های مختلفی وجود دارد که میتوان بر روی نواحی مورد نظر علامت گذاشت. در این محیط حتی امکان پخش تصویر بصورت آنلاین بین چند نفر وجود دارد به منظور مشورت در تشخیص یا اهداف آموزشی و...

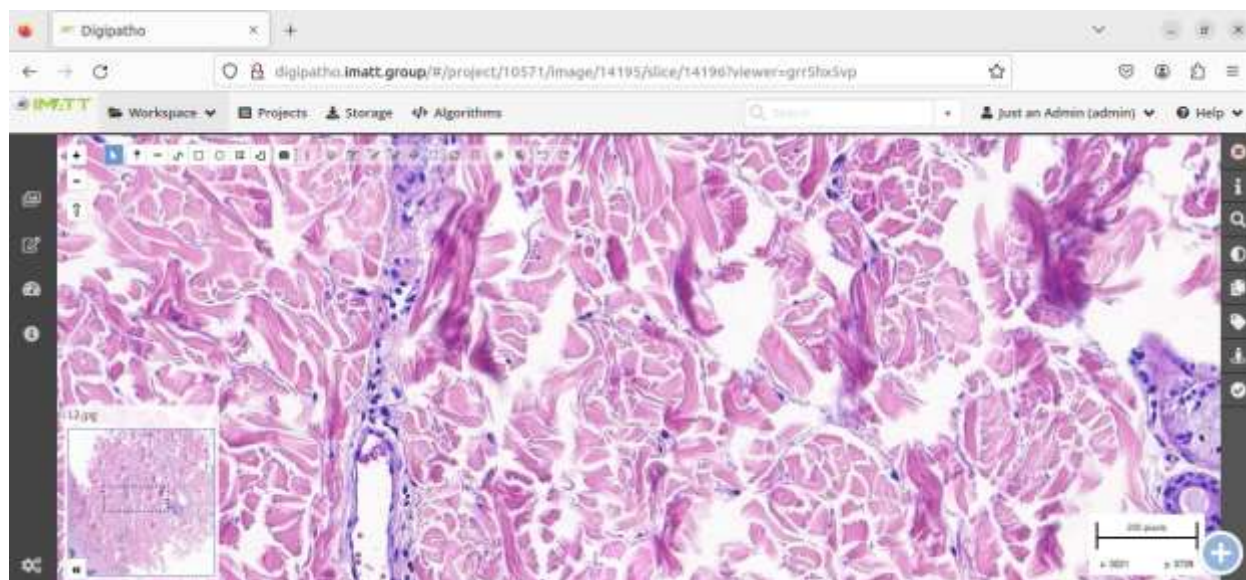

با ایجاد علامت میتوان برای هر علامت مشخصات مختلفی را تعیین نمود یا حتی یک فایل را ضمیمه آن کرد. همچنین به منظور دسته بندی و مدیریت بهتر تصاویر میتوان برچسب گذاری انجام داد.

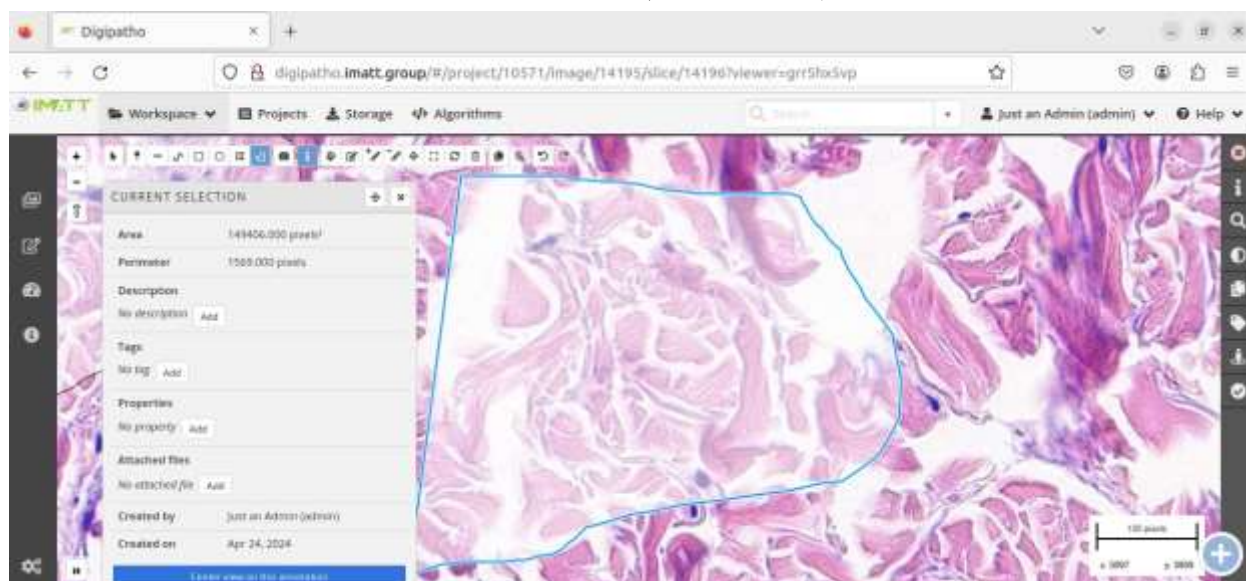

برای مقایسه دو نوع رنگ آمیزی از یک بافت نیز میتوان از گزینه + در گوشه پایین سمت راست تصویر استفاده نمود و بیش از یک تصویر را بصورت همزمان مشاهده نمود.

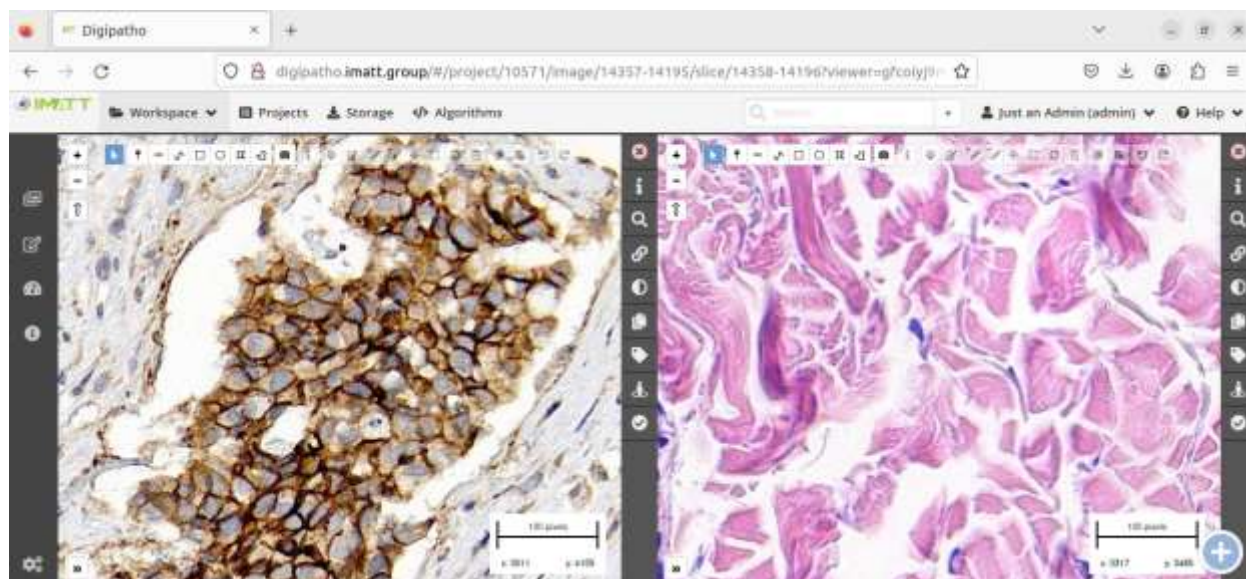

برای هر تصویر یا پروژه میتوان دسترسی تعریف نمود که افرادی توانایی مشاهده یا علامت گذاری و تغییرات داشته باشند. و تمام فعالیت های این افراد قابل بازبینی و بازگردانی در صورت نیاز می باشد.